

Mode d'emploi des aligneurs SmileTech



PRENDRE SOIN DE:

- Porter les aligneurs selon les instructions du praticien, soit 22 heures par jour.
- Nettoyer les gouttières au moins une fois par jour à l'aide d'une brosse à dents et de dentifrice.

UTILISATION ET HYGIÈNE BUCCALE:

- Toujours enlever vos aligneurs pour manger ou boire autre chose que de l'eau fraîche.
- Toujours se brosser les dents avant de mettre la gouttière.
- En cas d'une éventuelle casse ou perte d'un aligneur, continuer de le porter si possible et contactez votre praticien.
- Ranger vos gouttières dans la boîte qui vous a été fournie.
- Ne pas mâcher de chewing-gum avec les aligneurs.
- Suivre les numéros des gouttières dans l'ordre croissant.

MISE EN PLACE DES ALIGNEURS:

- Pour la mise en place d'une gouttière, la pousser légèrement sur les dents antérieures (de devant) puis exercer une légère pression derrière, au niveau des molaires.
- Ne pas mordre la gouttière pour l'enfoncer, au risque de l'endommager.
- S'assurer que le numéro de la gouttière est le bon, ils vont dans l'ordre croissant tout au long du traitement.

ENLEVER LES GOUTTIÈRES:

- Commencer par retirer délicatement les gouttières au niveau des molaires, coté joue.
- Retirer délicatement l'avant de la gouttière, elle sortira sans forcer.
- Ne jamais utiliser d'outil pour enlever les gouttières ni y exercer aucune force dépassant le délicat.
- Ne pas utiliser de bain de bouche ou tout autre produit de nettoyage sur les aligneurs.

Il est important de noter que vos aligneurs sont entièrement conçus et fabriqués en France.